



MaMMaTENS

KAN IK MaMMaTENS ALLÉÉN TIJDENS MIJN BEVALLING GEBRUIKEN?

Nee! Je kunt de MaMMaTENS vóór je bevalling gebruiken tegen de misselijkheid. MaMMaTENS elektroden mag je tijdens je zwangerschap nooit op je buik of rug aanbrengen! Ook ná je bevalling kun je de TENS nog gebruiken om je bekkenbodemspieren, je buik-spieren, én je bilspieren te trainen. Ook incontinentie als gevolg van de zwangerschap kan vaak goed behandeld worden met onze MaMMaTENS apparaten.



Omnitens XP+

UITERMATE GESCHIKT VOOR PIJNBESTRIJDING BIJ BEVALLINGEN.

Dankzij de **BOOST** knop kan heel eenvoudig (met één druk op de knop) de stroom (tijdelijk) snel worden opgevoerd, om snel opkomende hevige pijnen goed te kunnen onderdrukken.



TENStem eco basic

MODERN TENS APPARAAT VOOR PIJNBESTRIJDING

Deze 2-kanaals TENStem Eco Basic is een veelzijdig TENS apparaat, dat met tot wel vier elektroden tegelijkertijd kan worden gebruikt. Naast de verschillende programma's om (intense) pijn te bestrijden, zitten er speciale programma's op om spieren te ontspannen en de doorbloeding te verbeteren.



TENS eco 2

Het parade paardje van MaMMaTENS.

De Eco2 is onze nieuwste Tens. Het handzame, compacte TENS-apparaat is een combinatie van een modern en gebruikersvriendelijk design, met meerdere toepassingsmogelijkheden.

De ingebouwde accu zorgt voor optimaal gebruiksgemak.

Kijk voor informatie, bijvoorbeeld over vergoedingen, en het plaatsen van je bestelling op mammatens.nl

OVER MaMMaTENS

MaMMaTENS is onderdeel van de schwa-medico Group in Duitsland. Wij leveren al meer dan 20 jaar TENS-apparaatjes in ziekenhuizen en gebruiken de kennis en ervaring die wij daar hebben opgedaan om pijn te bestrijden.

Heb je nog vragen?

Stuur een mailtje naar info@mammatens.nl

of bel ons op **033-465 50 64**

Kijk voor informatie, bijvoorbeeld over vergoedingen, en het plaatsen van je bestelling op mammatens.nl

Volg ons op Facebook en Instagram



MaMMaTENS

MaMMaTENS Nederland BV | Koningin Julianaplein 10 | 3931 CK WOUDEBERG

Telefoon 033 4655064 | info@mammatens.nl | www.mammatens.nl



MaMMaTENS



MaMMaTENS

(Transcutane Elektro Neuro Stimulatie)

Werkt het echt?

Wordt het vergoed?



MaMMaTENS



WERKT HET ECHT?

Ja! Talloze wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat TENS pijnverlichting geeft tijdens de bevalling. Grofweg zijn er 2 pijn onderdrukkende mechanismen. Bij het ene mechanisme zorgt de toegediende stroom ervoor dat de pijn min of meer geblokkeerd wordt, waardoor de pijn afneemt.

Het tweede mechanisme zorgt ervoor dat de pijn wordt bestreden door de aanmaak van lichaamseigen pijn dempende stoffen ("endorfinen"). Een combinatie van deze 2 mechanismen is het meest effectief. TENS verlicht dan niet alleen de pijn door de onderdrukking ervan, maar laat je ook beter ontspannen.

IS HET GEVAARLIJK?

Nee, MaMMaTENS is volledig veilig voor jou en je baby. De elektrische impulsen zijn zo laag, dat het voor jou of je baby geen kwaad kan. Raadpleeg altijd wel eerst je arts of verloskundige vóórdat je MaMMaTENS tijdens de zwangerschap (misselijkheid) gaat gebruiken.



De elektroden plaatsing tijdens de bevalling.

WORDT HET VERGOED?

Afhankelijk van je zorgverzekering en (aanvullende) pakket, wordt MaMMaTENS geheel of gedeeltelijk vergoed. Een actueel gedetailleerd overzicht kun je vinden op onze website: www.mammatens.nl. Ook kun je ons bellen op **033-465 50 64**, dan helpen wij je graag verder! Als je zorgverzekering hieraan meebetaalt, dan ontvangen wij graag een verzoek van je verloskundige, de huisarts of gynaecoloog voor het inzetten van TENS bij de bevalling.

Mocht jouw zorgverzekering MaMMaTENS niet vergoeden, dan kun je er één bij ons bestellen voor maar **€ 125,00**. Wij adviseren je de rekening altijd bij je zorgverzekering te declareren, omdat je soms wel een tegemoetkoming krijgt.

Ben je bij Zilveren Kruis / Achmea verzekerd? Dan declareren wij rechtstreeks voor je bij je zorgverzekering!

VERGOED JOUW VERZEKERING HET NIET? HUUR DAN!

Huur jouw MaMMaTENS bij ons! Voorkom onnodige stress en huur, al vanaf € 1,30 per dag een van onze MaMMaTENS apparaten gedurende 6 weken. Ben je al bijna uitgerekend en wil je het korter huren? Kies dan voor onze daghuur optie! Dan kies je zelf hoeveel dagen je wilt huren.

HOE GEBRUIK JE MaMMaTENS BIJ DE BEVALLING IN DE PRAKTIJK?

De elektroden worden op 2 niveaus op je rug geplakt: Eerst hoger op de rug tijdens de (voor)weeën. Deze stimulatie onderdrukt de pijn veroorzaakt door de baarmoeder. Later, als de ontsluiting zich aandient, wordt ook lager op de rug gestimuleerd om de pijn bij de ontsluiting te onderdrukken. De ervaring leert, dat de bevalling minder pijnlijk is, de bevalling door MaMMaTENS wat soepeler verloopt en dat je daarna ook sneller weer "op de been" bent.

