

TENS eco 2





Eenvoudige gebruiksaanwijzing



schwa-medico
MEDISCHE APPARATEN

Attentie: sluit de kabel(s) aan op het apparaat, verbind die met de elektroden en plak deze op de huid, voordat u de TENS eco 2 inschakelt en de stroom opvoert!

Het schuifknopje aan de onderzijde van het apparaat moet op ON staan.

1. Aan/uit schakelaar
2. Programmakeuze: Druk op P om het juiste programma te kiezen
3. Intensiteitregeling:
intensiteit kanaal 1 **intensiteit kanaal 2**
 stroom omhoog  stroom omhoog
 stroom omlaag  stroom omlaag
4. ON-OFF schakelaar

Attentie: de intensiteit wordt automatisch vergrendeld als deze 5 seconde niet is veranderd. Ontgrendelen doet u door eerst de stroom omlaag te brengen.

Stimulatie stoppen

Druk 2 seconde op P om de stimulatie handmatig te stoppen.

Opladen

Let er op of de LED op de oplader op rood staat tijdens het opladen!



Lees a.u.b. voor het eerste gebruik eerst de Veiligheidsinstructies / waarschuwingen, de contra-indicaties en het in de gebruiksaanwijzing beschreven beoogd gebruik zorgvuldig door.

Schakelaar op OFF tijdens opladen!



schwa-medico Nederland B. V.

Koningin Julianaplein 10 | 3931 CK Woudenberg | Tel. 033 4655064

Fax 033 4612223 | E-mail info@schwa-medico.nl | www.schwa-medico.nl



Pierenkemper GmbH

CE 0482

Am Geiersberg 6 | 35630 Ehringshausen | Duitsland


www.pierenkemper.eu

TENS eco 2

Overzicht van de programma's

Programma's		
P1	U1	Gate control (100 Hz)
P2	U2	Gate control (80 Hz)
P3	U3	Lage frequentie (2 Hz)
P4	U4	Kanaal 1 gate control (100 Hz) Kanaal 2 lage frequentie (2Hz)
P5	U5	Aanpassing: 10 minuten gate control (100 Hz) 20 minuten lage frequentie (2 Hz)
P6	U6	HAN-stimulatie: 100 Hz en 2 Hz ledere 3 seconde wisselend
P7	U7	Burst
P8	U8	Modulatie (2 – 80 – 2 Hz in 15 seconde)
P9	U9	Spierstimulatie
P10	U10	Gate control, dynamisch langzaam
P11	U11	Gate control, dynamisch snel
P12	U12	Diepte TENS

Bevestiging van de elektroden

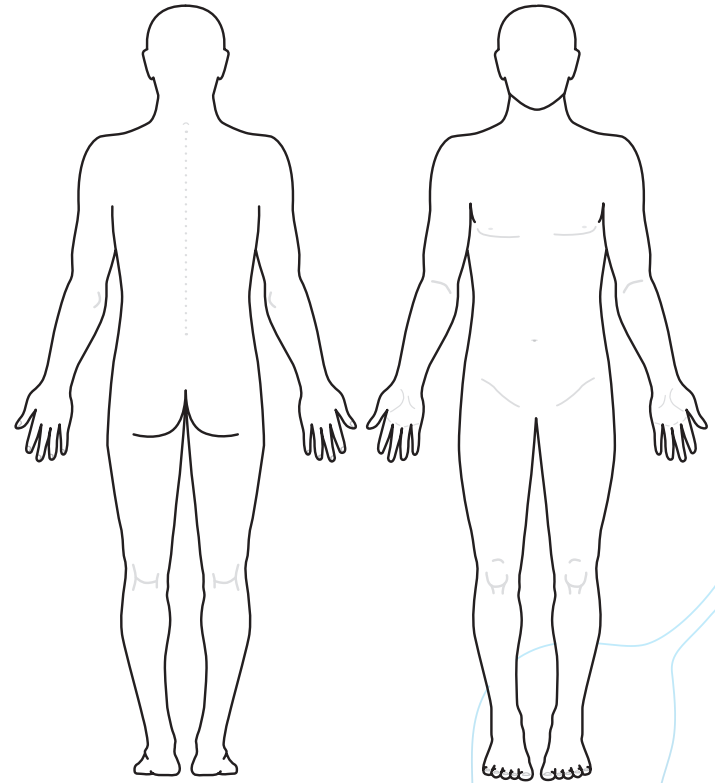

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

..... x per dag.