




TENStem eco basic eenvoudige gebruiksaanwijzing

Uw persoonlijke hulp bij pijn

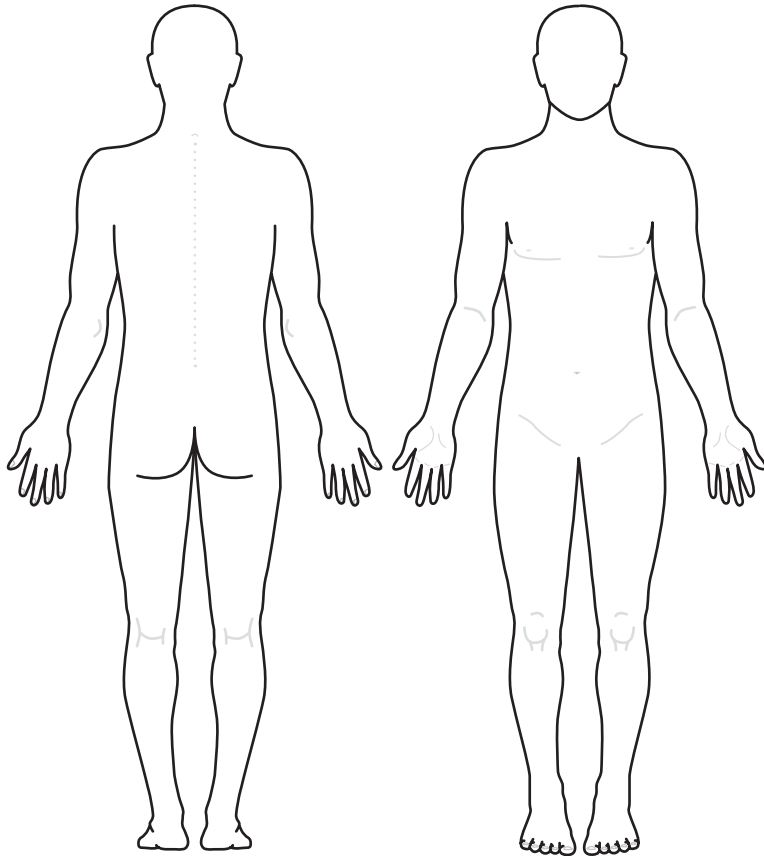

PROGRAMMA'S

P 1	Gate control 1 (100 Hz)
P 2	Gate control 2 (80 Hz)
P 3	Lage frequentie (2 Hz)
P 4	Gate control (100 Hz) en lage frequentie (2Hz)
P 5	Aanpassing: 10 minuten gate control (100 Hz) 20 minuten lage frequentie (2 Hz)
P 6	HAN: 100 Hz en 2 Hz iedere 3 seconde wisselend
P 7	Burst
P 8	Modulatie (2 – 80 – 2 Hz in 15 seconde)
P 9	Spiertraining
P 10	Dynamic 1
P 11	Dynamic 2

Aanpasbare programma's vanaf serie C

P 12	Diepte TENS
P 13	Aanpasbare TENS-stimulatie
P 14	Aanpasbare spierstimulatie
P 15	Aanpasbaar losmaken van de spieren
Aanpasbaar programma vanaf serie E	
P 16	monofasisch programma

..... x per dag.

Uw persoonlijke hulp bij pijn

Attentie: sluit de kabel(s) aan op het apparaat, verbind die met de elektroden en plak deze op de huid, voordat u de TENSstem eco basic inschakelt en de stroom opvoert!

1. Aan/uit schakelaar
2. Programmakeuze
Druk op **P** om het juiste programma te kiezen
3. Intensiteitregeling
intensiteit kanaal 1 **intensiteit kanaal 2**
▲ stroom omhoog ▲ stroom omhoog
▼ stroom omlaag ▼ stroom omlaag

Stimulatie stoppen

Druk op **P** of op aan/uit om de stimulatie handmatig te stoppen.



schwa-medico
MEDISCHE APPARATEN

schwa-medico Nederland B.V. · Koningin Julianaplein 10 · 3931 CK WOUDEBERG
tel.: 033 4655064 · fax: 033 4612223 · email: info@schwa-medico.nl · www.schwa-medico.com